

EINFACH · STABIL · EFFIZIENT

BIS ZUM LETZTEN TUCH

Incidin™ Wipes FlexPack

Hygienischer Einweg-Tuchspender für die einfache und effiziente Flächendesinfektion.

Das Incidin™ Wipes FlexPack ist in Kombination mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln (z. B. Incidin™ Pro) die Innovation für eine einfache und effiziente Oberflächenreinigung.

DIE VORTEILE DES INCIDIN™ WIPES FLEXPACK

- ▲ EINFACH - Befüllen und Beschriften leicht gemacht
- ▲ STABIL - bis zum letzten Tuch
- ▲ EFFIZIENT - spart Zeit, Platz, Kosten und Abfall



Incidin™ Wipes FlexPack

Hygienischer Einweg-Tuchspender für die einfache und effiziente Flächendesinfektion.

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Einfach	Der Tuchspender ist einfach zu befüllen und zu beschriften. Der Tragegriff erleichtert den Transport an den POC (Point of Care). Eine Farbcodierung erlaubt die Befüllung mit unterschiedlichen Produkten oder den Einsatz in speziellen Bereichen/Situationen.
Stabil	Standzeit mit angesetzter Lösung bis zu 31 Tage
Effizient	Spart Zeit durch den Wegfall von Transport und Aufbereitung, Spart Lagerplatz, Spart Kosten durch effizientere Prozesse und geringes Abfallvolumen.
Kompatibel	Zur kombinierten Anwendung mit den folgenden Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™-Produktreihe: Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Rapid, Incidin™ Foam, Incidin™ Liquid, Incidin™ OxyFoam S

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hygienischer Einweg-Tuchspender in Form einer stabilen Standtüte mit Tragegriff. Transparente Seitenflächen zur Kontrolle des Verbrauchs. Enthält eine Tuchrolle aus hochwertigem trockenem fusselfreien Premium-PET-Vliestuch (Tuchgröße 20 x 38 cm) zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™-Produktreihe sowie einer Verschlusskappe mit Aufklebern und Hygienesiegel in drei Farben (grün, rot, blau).

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ Wipes FlexPack mit blauer Kappe	6 Rollen á 99 Tücher / Karton	3095660 PZN 138 79 554
Incidin™ Wipes FlexPack mit grüner Kappe	6 Rollen á 99 Tücher / Karton	3095700 PZN 138 79 494
Incidin™ Wipes FlexPack mit roter Kappe	6 Rollen á 99 Tücher / Karton	3095680 PZN 138 79 560

Incidin Wipes FlexPack ist als Zubehör für Medizin Produkte klassifiziert.



Eine Gebrauchsanleitung und weitere Informationen finden Sie hier

ANWENDUNGSHINWEISE



1 Handschuhe anziehen.




2,5 L Incidin™ Desinfektionslösung einfüllen.



7 Halten Sie das FlexPack an den markierten Stellen links oder rechts vom Deckel fest. Drehen Sie den Deckel auf der Packung im Uhrzeigersinn fest, beginnen Sie an der Markierung bis es einrastet.



2 Halten Sie das FlexPack an den markierten Stellen links oder rechts vom Deckel fest. Brechen Sie das Siegel durch Aufschrauben des Deckels entgegen dem Uhrzeigersinn auf. Legen Sie den Deckel mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.

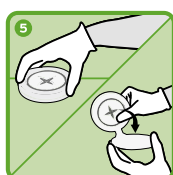

5 Öffnen Sie den Deckel.



8 Bitte kreuzen Sie die erforderlichen Angaben auf dem Deckel an. Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit einsatzbereit.



3 Ziehen Sie das erste Tuch ein Stück raus.



6 Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Deckel verschließen.



9 Vor Verwerfen ggf. Flüssigkeit entsorgen. Dafür schneiden Sie eine obere Ecke ab und entsorgen so einfach die Flüssigkeit. Danach können Sie das Incidin™ Wipes FlexPack verwerfen.

ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
+41(0)44-877-2000
www.ecolab.eu

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49(0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de

REGIONAL OFFICE

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66
www.ecolabhealthcare.ch

