

Dosiertabelle Anios'Clean Excel D



Gebrauchslösung	Konzentration		
	0.5%	1%	2%
1 Liter	5 ml	10 ml	20 ml
2 Liter	10 ml	20 ml	40 ml
4 Liter	20 ml	40 ml	80 ml
8 Liter	40 ml	80 ml	160 ml

09/214


BITTE BEACHTEN SIE:

Zu verdünnendes Konzentrat. Mindesteinwirkzeit von 5 min einhalten. Instrumente vollständig eintauchen und sicherstellen, dass alle Oberflächen vollständig benetzt sind. Das Einweichbad während der Einwirkzeit abgedeckt halten.

Mit Leitungswasser abspülen, um etwaige Produktrückstände sowie ggf. organischen Restschmutz zu entfernen. Erneuern Sie die Gebrauchslösung gemäß der Gebrauchsanweisung.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
0459 France

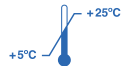

www.ecolab.com