

Dosiertabelle

Sekusept™ Pulver CLASSIC



20 g Pulver = 25 ml

1 Dosierlöffel = 20 g Pulver = 25 ml

1 Dosierbecher = 160 g Pulver = 200 ml

Liter Lösung	Konzentration der Anwendungslösung				
	0,5%	1%	1,5%	2%	4%
2 Liter	13 ml	25 ml	38 ml	50 ml	100 ml
4 Liter	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	200 ml
8 Liter	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	400 ml
10 Liter	63 ml	125 ml	188 ml	250 ml	500 ml
20 Liter	125 ml	250 ml	375 ml	500 ml	1000 ml
30 Liter	188 ml	375 ml	563 ml	750 ml	1500 ml

HC130

ANWENDUNGSHINWEISE

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Pulvermenge mit Hilfe des Dosierlöffels / - bechers einstreuen. Mehrmals kurz umrühren. Nach 15 min. ist die Anwendungslösung einsatzbereit. Die Lösung ist arbeitstäglich zu wechseln und bei visueller Kontamination sofort.



Ecolab Deutschland GmbH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 +49 (0) 2173-599-1900



www.ecolab.com