

Dosiertabelle Sekusept™ aktiv



100 g Pulver = 150 ml

1 Dosierlöffel = 20 g Pulver = 30 ml

1 Dosierbecher = 100 g Pulver = 150 ml

Liter Lösung	Konzentration der Anwendungslösung			
	1%	2%	3%	4%
2 Liter	30 ml	60 ml	90 ml	120 ml
4 Liter	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml
8 Liter	120 ml	240 ml	360 ml	480 ml
10 Liter	150 ml	300 ml	450 ml	900 ml
20 Liter	300 ml	600 ml	900 ml	1200 ml
30 Liter	450 ml	900 ml	1350 ml	1800 ml

HC 1131

ANWENDUNGSHINWEISE

Wasser vorlegen. Dem Wasservolumen entsprechende Pulvermenge mit Hilfe des Dosierlöffels / - bechers einstreuen. Mehrmals kurz umrühren. Nach 15 min. ist die Anwendungslösung einsatzbereit. Die Lösung ist arbeitstäglich zu wechseln und bei visueller Kontamination sofort.



Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900



www.ecolab.com