

BERÜHRUNGSLOSE HANDHYGIENE-STATION

Dermados™ Station touchless

**EINE BENUTZERFREUNDLICHE UND SICHERE
HYGIENESTATION, DIE EINFACH ÜBERALL DORT
PLATZIERT WERDEN KANN, WO SICHERE HAND-
HYGIENE ERFORDERLICH IST.**

Standsäule mit berührungslosem Desinfektionsmittelspender
zur hygienischen Entnahme von Händedesinfektionsmitteln.

- ▲ **HYGIENISCHE APPLIKATION**
durch berührungslose Bedienung
- ▲ **BATTERIEBETRIEBENES**
ausdauerndes System
- ▲ **SPART** Zeit und Geld

NEU!

ECOLAB®

www.ecolab.com

Dermados™ Station touchless

Eine benutzerfreundliche Hygienestation, die überall dort platziert werden kann, wo sichere Handhygiene erforderlich ist.

UNSERE LEISTUNG	IHR NUTZEN
Maximale Handhygiene durch berührungslose Bedienung	<ul style="list-style-type: none"> · Komfortable hygienische Entnahme · Auffangschale verhindert Tropfen auf den Boden
Sicheres kabelloses Stand-alone-Gerät mit Batteriebetrieb	<ul style="list-style-type: none"> · Frei positionierbar - keine Notwendigkeit von einer Wandmontage oder Kabelverlegung · Platzieren Sie die Station an der Stelle, wo sie gebraucht wird!
Einfache Wartung	<ul style="list-style-type: none"> · Einfacher Batteriewechsel · Geeignet für alle Ecolab Händedesinfektionsprodukte · Pumpenwechsel nur alle 3 Monate notwendig

PUMPE

Die einfach zu wechselnde Einweg-Rollerpumpe besteht aus Kunststoff. Die Pumpe ermöglicht einen Austausch in ca. 30 Sekunden, lange Ausfallzeiten entfallen dadurch. Der Austausch der Pumpe ist jederzeit möglich. Aus hygienischen Gründen wird empfohlen, die Pumpe alle drei Monate zu wechseln.

DOSIERUNG

Die Dosiermenge ist in vier Stufen regulierbar. Je nach Anforderung kann sie zwischen 1,6 bis 6,4 ml pro Hub eingestellt werden. Zur Einstellung drücken Sie bitte eine Sekunde den Einstellknopf. Sobald das LED rot blinkt, ist die nächste Dosierstufe erreicht. Sie können wählen zwischen:

- ▲ LED blinkt einmal rot Abgabemenge ca. 1,6 ml
- ▲ LED blinkt zweimal rot Abgabemenge ca. 3,2 ml
- ▲ LED blinkt dreimal rot Abgabemenge ca. 4,8 ml
- ▲ LED blinkt viermal rot Abgabemenge ca. 6,4 ml

REINIGUNG

Um einen hohen Hygienestandard zu garantieren, wird empfohlen, den Spender nach jedem Flaschenwechsel sachgemäß zu reinigen. Damit alle Produktrückstände entfernt werden und sich nicht mit dem neuen Produkt vermischen, empfiehlt es sich, den Spender und die Bestandteile mit heißem Wasser zu reinigen oder zu desinfizieren (z.B. mit Incidin™ Alcohol Wipes). Hierfür sollten keine ätzenden Produkte verwendet werden, da diese die Oberfläche angreifen und beschädigen würden.

HINWEIS

Bitte prüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Dermados™ Station Touchfree.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Dermados Station touchless S für 500 ml Flasche	1 Stück	102 401 66
Dermados Station touchless L für 1 L Flasche	1 Stück	102 401 67



Video Pumpenwechsel
in 30 Sekunden

TECHNISCHE DATEN

MASSANGABEN

Abmessungen: ca 400 X 400 X 1312 mm
(B x T x H)

Gewicht: ca. 20 kg

MATERIAL

- Gebürsteter Edelstahl
- ABS-Kunststoff (Spender)
- Silikon (Schlauch)

DOSIERUNG

- Werkseinstellung 3 ml mit doppel LED Sensortechnik
- Einstellbar
- Inklusive einer Ersatzpumpe

BATTERIE

Leistung: 4 x 1,5 V AA Mignon LR6

Dauer: mindestens 30.000 Zyklen. mit LED-Vorwarnung

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Jet Pumpe S	1 Stück	100 14 900
Jet Pumpe L	1 Stück	100 151 96
Flaschenfixierung S	1 Stück	100 153 77
Flaschenfixierung L	1 Stück	100 153 83
Schlüssel S/L	1 Stück	100 153 75
Schloss S/L	1 Stück	100 153 76
Tropfschale S	1 Stück	100 153 64
Tropfschale L	1 Stück	100 153 72



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900

www.ecolabhealthcare.de

© 2021 Ecolab Inc. Alle Rechte vorbehalten.

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH

Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66

www.ecolabhealthcare.ch

ECOLAB®

www.ecolab.com

HC 1168 Stand 02/2021