

## EINFACH · ANWENDERFREUNDLICH

## FÜR ZUVERLÄSSIGE FLÄCHENDESINFEKTION

### Incidin™ Premium Wipes

Hochwertige, fusselfreie Vliestücher für eine einfache, anwenderfreundliche und zuverlässige Flächendesinfektion im Trockentuch-Spendersystem.

**Tuchrolle aus hochwertigem trockenem fusselfreiem Vliestuch mit Sicherheitsetikett – zur Kennzeichnung von Produkt und Befülldatum.**

#### DIE VORTEILE DER INCIDIN™ PREMIUM WIPES

- ▲ Anwenderfreundliche Reinigung und Desinfektion von Oberflächen/ Medizinprodukten
- ▲ Beste PET-Tuchqualität (60 g/qm)
- ▲ Einfache Befüllung
- ▲ Standzeit: bis zu 28 Tage



# Incidin™ Premium Wipes

Hochwertige, fusselfreie Vliestücher für eine einfache, anwenderfreundliche und zuverlässige Flächendesinfektion im Trockentuchspendersystem.

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Anwenderfreundlich	Reinigung und Desinfektion kleiner und mittlerer Oberflächen / Medizinprodukte mit Premium-Tuchqualität
Einfach	Einfache Befüllung mittels Ecolab Dosiertechnik oder manuell angesetzter Anwendungs- oder Fertiglösung
Praxisgerechte Standzeit	Standzeit: bis zu 28 Tage in Kombination mit ausgewählten Ecolab-Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™-Produktreihe

## AUFBEREITUNG DES INCIDIN™ WIPES DISPENSER N

Um eine Kontamination des Inhalts zu verhindern, wird empfohlen, die Innenflächen des Eimers sowie den Verschluss zu reinigen und zu desinfizieren bevor erneut frische Incidin™ Premium Wipes mit der Lösung versehen werden. Die Aufbereitung des Dispensers kann manuell oder automatisch erfolgen.

Nach diesem Vorgehen kann der Incidin™ Wipes Dispenser N wieder aufgefüllt werden. Die Desinfektionslösung muss mit Wasser von Trinkqualität hergestellt werden.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Tuchrolle aus hochwertigem trockenem fusselfreiem Premium-PET-Vliestuch (Tuchgröße 20 x 38 cm) zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™-Produktreihe. Zur Anwendung im Tuchspender Incidin™ Wipes Dispenser N. Transparente Deckel mit Kappen in 3 Farben (grün, rot, blau) sorgen für eindeutige Kennzeichnung und ständige Füllstandskontrolle.

## BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin™ Premium Wipes	6 Rollen á 99 Tücher / Karton	100 10 279 PZN 116 06 562

## KOMBINIERBAR MIT

Incidin™ Wipes Dispenser N Tuchspender	1 Stück im Karton	100 33 125 PZN 109 46 586
--	-------------------	------------------------------

## ANWENDUNG


Zur kombinierten Anwendung mit den folgenden Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin™-Produktreihe:


Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Extra N, Incidin™ Rapid, Incidin™ Foam, Incidin™ Liquid, Incidin™ OxyFoam S


Eine Gebrauchsanleitung und weitere Informationen finden Sie hier

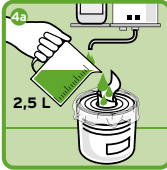



## ANWENDUNGSHINWEISE


- 


Handschuhe anziehen und Deckel abnehmen. Den Eimer vor der Wiederbefüllung mit Desinfektionslösung auswischen und ggf. säubern.
- 

Incidin™ Premium Wipes mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen.
- 

Die Rolle Incidin™ Premium Wipes hineinstellen und erstes Tuch herausziehen.
- 

2,5 L Incidin™ Desinfektionslösung einfüllen: Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Extra N und Incidin™ Rapid in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen.
- 

Incidin™ Liquid und Incidin™ Foam unverdünnt befüllen.
- 

Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Eimer mit dem Deckel verschliessen. Nach Einfüllen der Lösung 30 - 60 Min. warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.
- 

Nach dem Befüllvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben. Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden.

### ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Schweizland  
+41(0) 44-877-2000  
www.ecolab.eu

### REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49(0) 2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

### Ecolab (Schweiz) GmbH

Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41(0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch

