

## EINFACH · SICHER · SPART ZEIT &amp; KOSTEN

SPAREN SIE SICH DIE AUFBEREITUNG!

## Incidin™ Premium Wipes HygPack

Einzigartige hygienische Lösung für eine einfache Flächen-desinfektion im Tuchspendersystem auch für Risikobereiche

Kombinierbar mit  
Incidin™ OxyFoam S 5 Liter**SPORIZIDE** FLÄCHENDESINFEKTION  
MIT EINER STANDZEIT VON 31 TAGENDIE VORTEILE DES  
INCIDIN™ PREMIUM WIPES HYGPACK

- ▲ **Einfach** - Einsatz im bestehenden Incidin™ Wipes Dispenser N möglich
- ▲ **Sicher** - Anwendung auch in Risikobereichen
- ▲ **Spart Zeit und Kosten** - Keine Aufbereitung von Tuchspender und Deckel erforderlich

KOMBINIERBAR MIT DEM  
INCIDIN™ WIPES DISPENSER N

Wiederverschließbarer Tuchspender für Ecolab Incidin Premium Wipes &amp; Incidin Premium Wipes HygPack.

- ▲ Flexibel einsetzbar - für HygPack und Premium Wipes
- ▲ Absolut dicht - kein verschütten
- ▲ Einfache Anwendung - beim Ansetzen und Aufbereiten
- ▲ Transparenter Deckel zur Füllstandskontrolle
- ▲ Stabil und wiederverschließbar
- ▲ Standzeit: bis zu 31 Tage



# Incidin™ Premium Wipes HygPack

Einzigartige hygienische Lösung für eine einfache Flächen-desinfektion im Tuchspendersystem auch für Risikobereiche.

| Unsere Leistung       | Ihr Nutzen   |
|-----------------------|--|
| Einfach               | Einsatz im bestehenden Incidin™ Wipes Dispenser N möglich  |
| Sicher                | Anwendung auch in Risikobereichen                          |
| Spart Zeit und Kosten | Keine Aufbereitung von Tuchspender und Deckel erforderlich |

## BESTELLINFORMATIONEN

| Produkt   | Verpackungs-einheit | Artikel-nummer               |
|---|---------------------|------------------------------|
| Incidin™ Premium Wipes HygPack mit blauer Kappe | 6 Stück / Karton    | 100 32 688<br>PZN 109 46 391 |
| Incidin™ Premium Wipes HygPack mit grüner Kappe | 6 Stück / Karton    | 100 32 689<br>PZN 109 46 304 |
| Incidin™ Premium Wipes HygPack mit roter Kappe  | 6 Stück / Karton    | 100 32 690<br>PZN 109 46 511 |

## KOMBINIERBAR MIT

|  |                   |                              |
|--|-------------------|------------------------------|
| Incidin™ Wipes Dispenser N Tuchspender | 1 Stück im Karton | 100 33 125<br>PZN 109 46 586 |
|--|-------------------|------------------------------|

## BESTANDTEILE DES INCIDIN™ PREMIUM WIPES HYGPACK



Tuchrolle aus hochwertigem trockenem fussselfreiem Vliestuch



Speziell entwickelter Folienbeutel zur Vermeidung von Kontamination



Deckel mit farbiger Kappe - transparent für schnelle Füllstandskontrolle





Sicherheitsetikett - zur Kennzeichnung von Produkt und Befülldatum


Eine Gebrauchsanleitung und weitere Informationen finden Sie hier




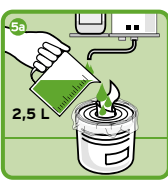
## ANWENDUNGSHINWEISE


- 


1 Handschuhe anziehen. Den Eimer vor der Wiederbefüllung auf sichtbare Verschmutzung hin überprüfen und ggf. säubern.
- 


2 Incidin™ Premium Wipes HygPack mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen. Der Folienbeutel befindet sich in der Mitte der Tuchrolle. Bitte diesen herausnehmen und alle Bestandteile (Deckel, Etikett und Folienbeutel) auf die Arbeitsfläche legen.
- 

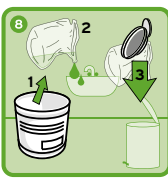
3 Folienbeutel in den Eimer einsetzen und über den Rand legen.
- 

4a Rolle Incidin™ Premium Wipes HygPack hineinstellen und erstes Tuch herausziehen.
- 

4b 2,5 L Incidin™ Desinfektionslösung einfüllen: Incidin™ Pro, Incidin™ Plus, Incidin™ Extra N und Incidin™ Rapid in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen.
- 

4c Incidin™ OxyFoam S, Incidin™ Liquid und Incidin™ Foam unverdünnt befüllen.
- 

6 Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Eimer mit dem Deckel verschliessen. Nach Einfüllen der Lösung 30 - 60 Min. warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.
- 

7 Nach dem Befüllungsvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben. Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden, Incidin™ OxyFoam S sogar 31 Tage.
- 

8 Nach Gebrauch Folienbeutel entnehmen, ggf. Flüssigkeit entsorgen, Beutel und Deckel verworfen. Eine Aufbereitung des Incidin™ Wipes Dispensers N braucht bei der Verwendung des Incidin™ Premium Wipes HygPack nicht erfolgen.

### ECOLAB HEALTHCARE EUROPE

Richtstrasse 7  
8304 Wallisellen  
Schweizland  
+41(0) 44-877-2000  
www.ecolab.eu

### REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
+49(0) 2173-599-1900  
www.ecolabhealthcare.de

### Ecolab (Schweiz) GmbH

Kägenstrasse 10  
4153 Reinach  
+41(0) 61-466-94-66  
www.ecolabhealthcare.ch

